

Số: 94 /QĐ-BV

Hà Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành quy trình xử lý tái sử dụng dụng cụ kim quang của khoa
Kiểm soát nhiễm khuẩn**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-SYT, ngày 25/5/2015 của Sở Y tế Hà Giang về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về Tổ chức bộ máy và công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 4068/QĐ-BYT, ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn biên soạn Quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-BV ngày 13 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành và thực hiện áp dụng hệ thống QLCL, Xây dựng QTCM theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động của Bệnh viện;

Thực hiện Quyết định số 3961/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KHTH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn: Quy trình xử lý tái sử dụng dụng cụ kim quang là một dụng cụ chữa bệnh bằng LASER để chiếu xạ trong mạch máu dùng cho khoa Phục hồi chức năng. Hướng dẫn quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn này là tài liệu hướng dẫn về Quy trình kỹ thuật xử lý tái sử dụng dụng cụ được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Giao cho Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Phục hồi chức năng, Các khoa có liên quan chịu trách nhiệm triển khai áp dụng quy trình trong cải tiến chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và phục vụ người bệnh tại Bệnh viện.

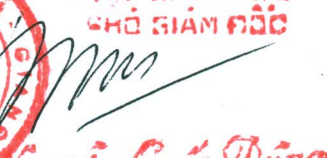
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng KHTH, các khoa có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- BHXH tỉnh Hà Giang;
- Ban Giám đốc;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC


K/T GIÁM ĐỐC
CHỖ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Dũng

**SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

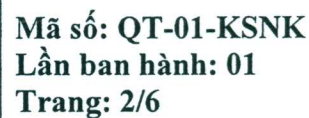


**QUY TRÌNH
XỬ LÝ TÁI SỬ DỤNG
DỤNG CỤ KIM QUANG**

Mã số: QT-01-KSNK
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: ...31.../...01.../2018

Trách nhiệm	Soạn thảo	Soát xét	Phê duyệt
Chức vụ	Điều dưỡng trưởng	Trưởng khoa	Giám đốc
Chữ ký		  	 
Họ tên	Hoàng Thị Tuyết	Nguyễn Văn Điệp	

SS. DANH NGUYỄN QUỐC DƯƠNG

[illegible]



**QUY TRÌNH
XỬ LÝ TÁI SỬ DỤNG
DỤNG CỤ KIM QUANG**

**Mã số: QT-01-KSNK
Lần ban hành: 01
Trang: 3/6**

I. MỤC ĐÍCH:

Kim quang là một dụng cụ chữa bệnh bằng laser để chiếu xạ trong mạch máu dùng trong khoa Phục hồi chức năng, là dụng cụ vô khuẩn hoàn toàn, tái sử dụng phải đảm bảo quy trình tiệt trùng theo quy định của Bộ Y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã và đang áp dụng quy trình xử lý tái sử dụng Kim quang tại khoa KSNK và khoa PHCN.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với:

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Khoa Phục hồi chức năng
- Các khoa liên quan

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Thực hiện theo QĐ 3961/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Hướng dẫn xây dựng, biên soạn Quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Quyết định 4068 của Bộ Y tế ngày 29/7/2016.
- Hướng dẫn xây dựng quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh theo tiêu chuẩn Iso 9001-2015.

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT:

4.1. Thuật ngữ:

4.2 Từ viết tắt:

- Kiểm soát nhiễm khuẩn: KSNK
- Phục hồi chức năng: PHCN

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

Kim quang là một dụng cụ chữa bệnh bằng laser để chiếu xạ trong mạch máu dùng trong khoa Phục hồi chức năng, là dụng cụ vô khuẩn hoàn toàn, tái sử dụng phải đảm bảo quy trình tiệt trùng theo quy định của Bộ y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng quy trình xử lý tái sử dụng dụng cụ Kim quang nhằm giảm bớt chi phí Khám bệnh, chữa bệnh mà vẫn đảm bảo vô khuẩn dụng cụ Kim quang chiếu xạ trong mạch máu dùng trong khoa PHCN.

Quy trình được xây dựng dựa theo Quyết định 3961/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp của Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Giang sử dụng công nghệ H₂O₂ (Hydrogen peroxidex), sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ kém chịu nhiệt.

Điều kiện để đánh giá quá trình tiệt khuẩn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang bao gồm:

- * Chỉ thị đổi màu;



**QUY TRÌNH
XỬ LÝ TÁI SỬ DỤNG
DỤNG CỤ KIM QUANG**

**Mã số: QT-01-KSNK
Lần ban hành: 01
Trang: 4/6**

* Test khóa học PCC 062 đổi màu;

* Test sinh học âm tính.

1. Dụng cụ sử dụng lần đầu của nhà sản xuất;
2. Dụng cụ sau khi sử dụng cho người bệnh, nhân viên tại khoa Phục Hồi chức năng rửa sạch đóng gói an toàn theo Quy trình sau đó chuyển đến khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
3. Tại khoa KSNK
 - 3.1. Nhân viên khoa KSNK thực hiện ngâm khử khuẩn bằng dung dịch Anios DD 1 trong thời gian khoảng 15 phút;
 - 3.2. Bơm rửa sạch, xì sấy khô hoàn toàn bằng máy áp lực;
 - 3.3. Đóng gói bằng túi ép chuyên dùng cho tiệt trùng nhiệt độ thấp;
 - 3.4. Đưa vào máy tiệt trùng nhiệt độ thấp trong thời gian 2 giờ;
 - 3.5. Lấy ra dán ngày tiệt trùng và hạn sử dụng cho dụng cụ đã tiệt trùng;
 - 3.6. Bảo quản và cấp phát cho khoa có nhu cầu sử dụng.



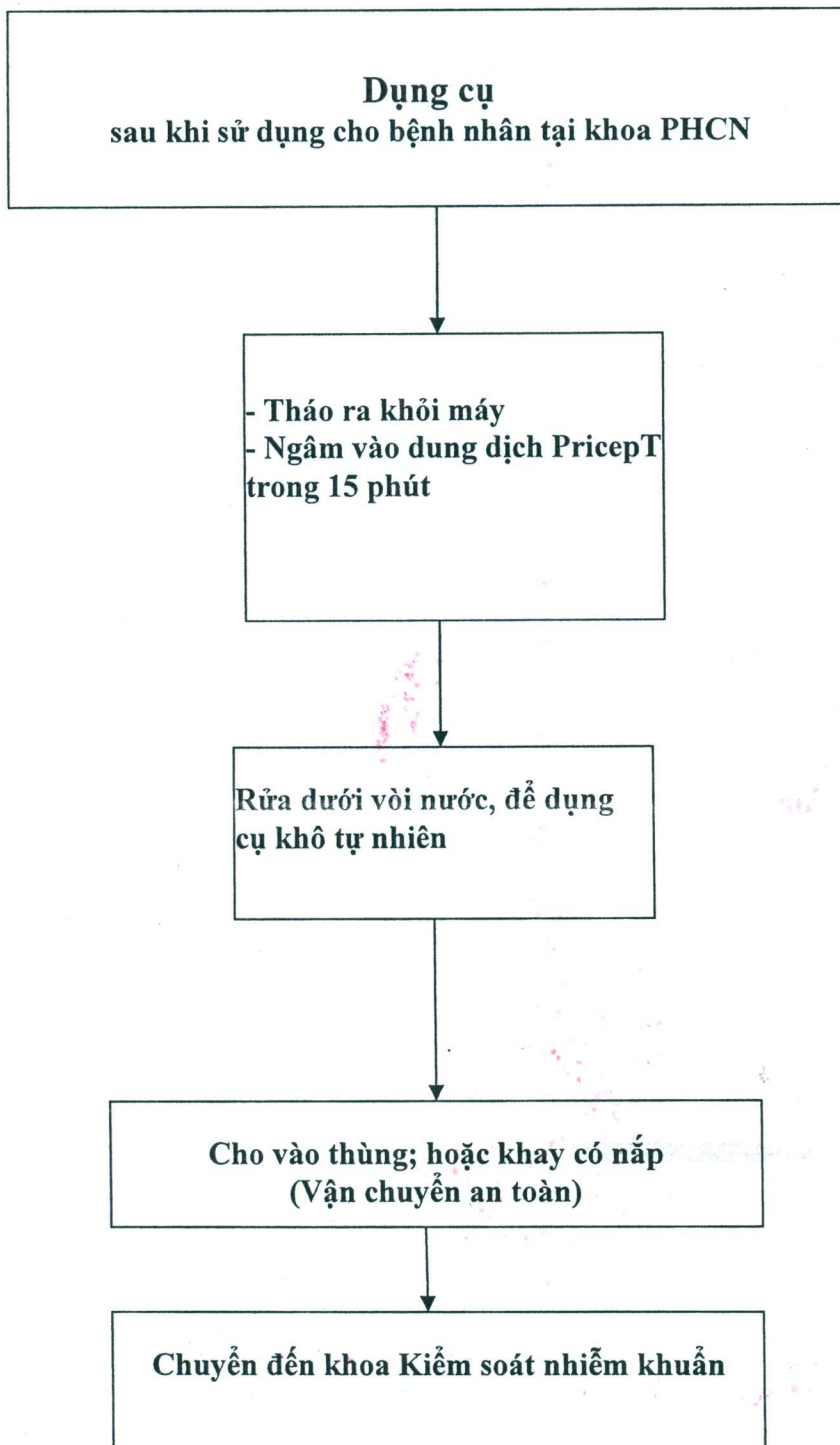
**QUY TRÌNH
XỬ LÝ TÁI SỬ DỤNG
DỤNG CỤ KIM QUANG**

**Mã số: QT-01-KSNK
Lần ban hành: 01
Trang: 5/6**

QUY TRÌNH XỬ LÝ TÁI SỬ DỤNG KIM QUANG

(Thực hiện kèm theo Quyết định số...../QĐ-BVT ngàytháng 01 năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang về việc xây dựng quy trình xử lý tái sử dụng kim quang)

I/ QUY TRÌNH LÀM SẠCH KIM QUANG TẠI KHOA PHCN





**QUY TRÌNH
XỬ LÝ TÁI SỬ DỤNG
DỤNG CỤ KIM QUANG**

**Mã số: QT-01-KSNK
Lần ban hành: 01
Trang: 6/6**

II/ QUY TRÌNH XỬ LÝ KIM QUANG TẠI KHOA KSNK

