

Số: 321/QĐ-BV

Hà Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thực hiện Tiệt khuẩn dụng cụ Phẫu thuật nội soi ổ bụng
bằng phương pháp Autoclave**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BV, ngày 02/2/2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế làm việc;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định 3761/QĐ-BYT, ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn;

Căn cứ Quyết định 3916/QĐ-BYT, ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BYT, ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Xét đề nghị của Trưởng khoa KSNK,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn tiến hành tiệt khuẩn dụng cụ Phẫu thuật nội soi ổ bụng bằng phương pháp Autoclave.

Điều 2. Quy trình thực hiện:

*** Đối với dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng:**

1. Dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng sau sử dụng được rửa sạch xì khô
2. Kiểm tra dụng cụ Optic, dây nguồn sáng, dây dao điện đơn cực, dây dao điện lưỡng cực, Troca 10, Troca 5, ống giảm, panh, kẹp, móc đốt, pipolar, kìm mang kim, ống hút.
3. Đóng gói bằng túi ép, chỉ đặt chỉ thị sinh học 1229, chỉ thị nhiệt.

*** Đối với nồi hơi tiệt khuẩn Autoclave:**

Cài đặt nhiệt độ tiệt khuẩn ở 134°C, thời gian tiệt khuẩn 07 phút, thời gian sấy khô 05 phút, áp suất khoang ngoài $\leq 02\text{kg}$, áp suất khoang trong $< 02\text{kg}$

*** Tiến hành thực nghiệm:**

Đặt dụng cụ vào nồi hơi, bật máy và theo dõi

*** Sau thực nghiệm:**

Sau thời gian thực hiện tiết khuẩn ở trên, tiến hành lấy dụng cụ kiểm tra

- Optic sáng bình thường không hỏng, không méo mó
- Dây nguồn sáng, sáng bình thường, không bị biến dạng dây
- Các dụng cụ khác không hỏng
- Test vi sinh đặt vào máy đọc test sau 03 giờ cho kết quả âm tính
- Khoa Vi sinh kiểm tra sau 48 giờ đọc kết quả âm tính.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Khoa KSNK và các khoa liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Sở Y tế Hà Giang;
- Ban Giám đốc;
- Website Bệnh viện
- Lưu: VT – KHTH.

GIÁM ĐỐC

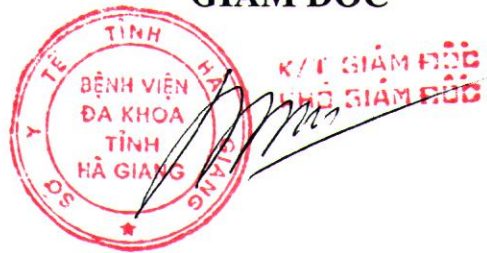

Bs CKII. Nguyễn Quốc Dũng